

HbA1c Control - Low

مقدمه :

این محصول ، کنترلی برای انجام تست های کنترل کیفی HbA1c در خون تام با استفاده از کیت دستگاهی HbA1c شرکت می باشد .

آماده سازی :

به هر ویال کنترل که بصورت لیوفیلیزه می باشد ، 1 میلی لیتر (1mL) محلول لیز کننده (Pretreatment) اضافه کنید . سپس ویال را به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید . برای حل شدن کامل محتویات ویال ، چندین بار ویال را به آرامی وارونه کرده و به حالت اول برگردانید . هنگام سنجش HbA1c لازم است دو ساعت از زمان حل کردن کنترل گذشته باشد .

پایداری :

قبل از حل شدن : تا تاریخ انقضا در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد
پس از حل شدن : به مدت 6 روز در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد

هشدارها :

- این کنترل فقط برای مصرف آزمایشگاهی می باشد .
- در این کنترل ها از خون انسان استفاده شده است . هرچند که بر اساس آزمایشات انجام شده بر روی این کنترل ها ، مشخص گردیده است که از لحاظ HBs antigen ، anti-HCV antibodies ، anti-HIV antibodies منفی می باشد ، هنگام کار با این کنترل لازم است با آن همانند یک نمونه عفونی برخورد کرد .

بسته بندی :

1 عدد ویال 1 میلی لیتری

Cat No: PTCE00051

Lot No. : 1402E

Test	IFCC (mmol/mol)	NGSP (%)
HbA1c Control-Low	24.6-48.6	4.4 – 6.6